



## Rollstuhlbefestigung im Fahrzeug

1. Platzieren Sie den Rollstuhl vor der ausgeklappten Rampe.
2. Deaktivieren Sie den **Sperrschalter (A)** der vorderen Automatikgurte (Schalter leuchtet ROT!)
3. Ziehen Sie die **Automatikgurte (B)\*** bis zum Rollstuhl aus und befestigen Sie diese an einem festen Rahmenteil des Rollstuhls (keinesfalls an abnehmbaren Fußstützen oder Rädern!) oder an entsprechenden Kraftknoten, sofern der Rollstuhl damit ausgerüstet ist.
4. Aktivieren Sie den **Sperrschalter (A)** der vorderen Automatikgurte (rote LED im Schalter AUS!)
5. Schieben Sie den Rollstuhl ins Fahrzeug bis in die gewünschte Position, achten Sie darauf, dass die vorderen **Automatikgurte (B)\*** aufgerollt sind und gegen Zurückrollen des Rollstuhls automatisch sperren.
6. Setzen Sie die beiden hinteren **Retraktoren (C)** auf die vorgesehenen Fittinge im Boden. Befestigen Sie beide **Gurte** hinten am Rollstuhl an einem festen Rahmenteil des Rollstuhls (keinesfalls an abnehmbaren Fußstützen oder Rädern!) oder an entsprechenden Kraftknoten, sofern der Rollstuhl damit ausgerüstet ist. Spannen Sie die **Retraktoren (C)** mit den Handrädern fest.
7. Legen Sie den **Beckengurt\*** an und verbinden Sie diesen mit den beiden **Gurtzungen (D)** der hinteren Retraktoren (sofern der Rollstuhl ein Kraftknotensystem hat, den bereits vorhandenen Beckengurt schließen).
8. Verbinden Sie den **Schulterschräggurt\*** mit der **Gurtzunge (E)** am **Beckengurt**.

Wichtig: Die Gurte müssen vor jeder Fahrt auf korrekten Sitz überprüft werden.